

FICHA TÉCNICA HOSPITALARIA

SANIT MAK PLUS

Propiedades

Detergente descontaminante de instrumental médico.

Producto Sanitario (PS) Clase I
2017/745 MDR
UDI-DI Básico: 843653210MAK9285Z

Características

TOTAL VIABLES MICRO (MLM-AER / MLM-HL)	<1000 ufc/ml o ufc/g
CONTROL MICRO (MLM-PREP)	
ASPECTO	LIQUIDO TRANSPARENTE
COLOR	LIGERAMENTE AMARILLENTO
OLOR	INODORO
DENSIDAD (g/ml)	1.05 ± 0.02
IND.REFRACCION	20 ± 2
PH (1%)	10.2 ± 0.5
PATÓGENOS (MLM-PAT)	AUSENCIA

Aplicaciones

Producto indicado para la limpieza de utensilios de anestesia, inhaladores, biberones, instrumental quirúrgico, microquirúrgico, endoscopios o contenedores de instrumental para cirugía mínima invasiva (MIC). Apto para el tratamiento contra priones. Eficaz en todo tipo de aguas. Especial para aguas duras. No contiene fosfatos. Apto para su uso en ultrasonidos.

Dosificación y modo de empleo

Para lavadoras automáticas con compartimento de carga: 30-45 ml/ciclo lavado.
Para lavadoras automáticas con bomba dosificadora: 0,8-1,2%.
Válido para uso manual: 0,8-1,2%.

Contiene otros componentes

Policarboxilatos, Enzimas.
Agentes conservantes: Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2Hisotiazol-3-ona y 2-metil-2 H-isotiazol-3-ona (3:1), Subtilisina.

Fecha Impresión: 16-01-25 Fecha Versión: 16-01-25 Versión: 12 Código: 0000928 Nombre: SANIT MAK PLUS